




# iCOquit® Smokerlyzer®

CO-enhet som hjälper patienter att sluta röka.

iCOquit® är en Bluetooth® kolmonoxid (CO)-enhet för hemmabruk som ingår i den välkända Smokerlyzer®-serien. Med gratisappen iCOquit® och denna CO-enhet kan patienterna säkert och enkelt övervaka sina CO-avläsningar och dela resultaten med rökavvänjningsrådgivare. iCOquit® är kompakt och bärbar och ger resultat direkt. Perfekt för CO-övervakning på distans.

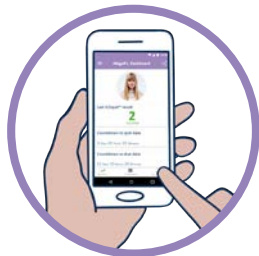

## Funktioner och fördelar

Ansluts till en smartphone via Bluetooth®



Patienter kan enkelt dela sina framsteg med hälsovårdspersonal



Övervaka dina rökavvänjningsframsteg



Använd närhelst och varhelst du vill



Snabbt andningstest, resultat direkt



Bli rökfri



# Det är lättare än någonsin att sluta röka med iCOquit® Smokerlyzer®



Välj andningstest på instrumentpanelen.




Anslut iCOquit®-enheten.



Andas in och håll andan i 15 sekunder.



Andas sakta ut i iCOquit®.

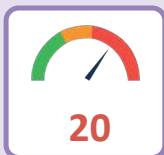

Se resultatet direkt.



Upprepa tills du är rökfri.

## Teknisk Specifikation

Elektrokemisk	Kolmonoxid (CO)
Detektionsmetod	Elektrokemisk
Koncentrationsintervall	0 - 100 ppm
Övervakningsintervall	1 ppm
Övervakningsnoggrannhet	$\pm \leq 3$ ppm / $\pm \leq 10\%$ av avläsning*
Övervakningsupprepning	$\pm \leq 3$ ppm / 5% (inom 120 sek)*
Driftstid	12 månader
Skärm	Via mobilappen iCOquit®
Batteritid	12 månader, batteriet kan inte bytas ut
Strömförsörjning	3 V litiumjonbatteri
T <sub>90</sub> -responstid	< 30 sekunder
Drifttemperatur	15 - 35°C
Förvaring/ transport temperatur	0 - 50°C
Drift och Förvaring/transport luftfuktighet	10 - 90 % RH icke-kondenserande
Användning och förvaring/transporttryck	912,0 - 1114,0 mbar
Dimensioner	Mindre än 150 mm lång x 30 mm diameter
Vikt	Mindre än 100 g
Material	Plasthölje: ABS och polykarbonat
H <sub>2</sub> Korskänslighet	$\leq 6\%$
Den tid som krävs för att värma/kyla från den lägsta/högsta förvaringstemperaturen före användning	15 minuter

\*Beroende på vilket som är störst

iCOquit® är också perfekt för:

- Hälsovårdspersonal
- Läkemedelsföretag
- Apputvecklare



BRITTISK  
TEKNOLOGI

Besök [www.bedfont.com/resources](http://www.bedfont.com/resources) för att se detta dokument på andra språk.



**Bedfont® Scientific Ltd.**  
Station Road, Harrietsham, Maidstone,  
Kent, ME17 1JA England  
Tel: +44 (0)1622 851122 Fax: +44 (0)1622 854860  
Email: [ask@bedfont.com](mailto:ask@bedfont.com) Web: [www.bedfont.com](http://www.bedfont.com)

© Bedfont® Scientific Limited 2024

Nummer 8 - Sepyember 2024, artikelnummer: MKT523\_MAT\_SE  
Bedfont® Scientific Limited förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera sin litteratur utan förvarning. Registrerad i: England och Wales. Registrerat nr: 1289798



**Emergo Europe B.V.**  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands.

